

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Versie t.b.v. website

Doel

Het verkrijgen van sputum voor microbiologisch onderzoek.

Benodigd materiaal

- Steriele container met schroefdop

Werkwijze

- Voorzie de container van patiëntgegevens van de patiënt (naam en geboortedatum / patiëntnummer / BSN-nummer)
- Neem het materiaal bij voorkeur voor het ontbijt af.
- Laat de patiënt een goede fluim in het sputumpotje deponeren (dus geen speeksel).
- Apart vermelden of gekweekt moet worden op Legionella, tuberculose of schimmels.
- Bij verdenking op tuberculose moet er driemaal sputum ingeleverd worden op 3 verschillende afnamedagen.
- Breng of verzend het materiaal met aanvraag naar een locatie van Microvida.