

**Titel: Scabiës: afname huidschilfers voor scabiës (Bravis)**

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: 20-09-2021 import uit Zenya, locatie Bravis, ID 042861  
19-04-2017 geautoriseerd door B. Wintermans

## Doel

Het afnemen van huidschilfers voor Scabiës PCR

## Toepassingsgebied

Deze instructie is bedoeld voor alle medewerkers (intern en extern) die deze handeling mogen uitvoeren.

## Benodigd materiaal

- Handschoenen
- Plastic schrapertje/chirurgisch mesje/objectglaasje
- potje

## Werkwijze

- Trek handschoenen aan
- Zoek naar een plekje op de aangedane huid waarvan makkelijk huidschilfers afgenomen kunnen worden
- Neem op beide onderstaande methoden materiaal af (plastic schrapertje en scalpel)
- **Methode 1:**  
Duw onder een hoek van 45° met de punt van het **plastic schrapertje** over de aangedane huid en vang daarbij de loskomende huidschilfers op in het meegeleverde potje.
- **Methode 2:**  
Houd in het geval van gebruik van een **scalpel** tijdens het schrapen de scherpe kant tegenovergesteld van de schraaprichting zodat verwonding vermeden word
- Doe het plastic schrapertje in het meegeleverde potje en in geval van gebruik van de scalpel gooi deze weg in daartoe bestemde naaldenbeker.
- Trek de handschoenen uit en desinfecteer de handen met handen alcohol
- Interne aanvragers: maak gebruik van ordermanagement in HIX en print een sticker uit.  
Voorzie het potje van deze ordersticker met patiëntgegevens van de juiste patiënt
- Externe aanvragers: voorzie het potje met de juiste patiëntgegevens
- Breng het materiaal met aanvraag naar de medische microbiologie.  
Locatie Roosendaal: routenummer 150 of verstuur alles met de buizenpost  
Locatie Bergen op Zoom: eerste verdieping laboratoria  
**OF** stuur het materiaal op per post in de aangeleverde verzendvelop

Postadres:  
Microvida  
Locatie Bravis Ziekenhuis  
Antwoordnummer 95  
4700 VB Roosendaal